



HORIZON
by platinum

platinum
STAIRLIFTS



PRODUKTBROSCHÜRE

DER HORIZON-TREPPENLIFT

Willkommen beim Treppenlift Platinum Horizon. Der ideale Treppenlift für die schnelle und einfache Installation auf einer geraden Treppe. Er wurde für Ihren Komfort entwickelt und verfügt einen ergonomischen Sitz und Funktionen, die vollständig an Sie angepasst werden können.

Die Wahl eines Treppenlifts kann eine überwältigende Entscheidung sein. Die Freiheit, die Ihnen geboten wird, um zu einem unabhängigen Leben zurückzukehren, ohne das Haus verlassen zu müssen, das Sie lieben, macht es jedoch zu einer großartigen Wahl, die Ihnen und Ihren Lieben eine bessere Lebensqualität und Ruhe bietet.



WARUM EINEN HORIZON TREPPENLIFT WÄHLEN?




SIMPLIZITÄT

Der Horizon kann schnell und einfach auf jeder geraden Treppe installiert werden, sodass Sie wieder das ganze Haus genießen können, das Sie lieben.



KOMFORT

Der Horizon-Treppenlift verfügt einen ergonomischen Sitz, verstellbare Armlehnen, eine Rückenlehne und eine Fußplatte, die Benutzern jeder Größe und Form eine einfache und bequeme Fahrt ermöglichen.

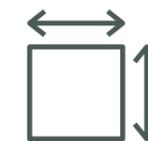

PLATZSPARENDE LÖSUNGEN

Der Horizon verfügt platzsparende Funktionen wie das Ergo Plus-Sitzpolster und eine ordentliche, elektrische Klappschiene. Die bodenmontierte Schiene, der leicht wegklappbare Sitz, die Arme und die hebelaktivierte Fußplatte machen Ihre Treppen frei von Hindernissen und bleiben für andere Haushaltsmitglieder zugänglich.



SICHERHEIT

Sicherheit ist von größter Bedeutung, damit Sie sich wohl fühlen. Jeder Treppenlift wurde vor Verlassen des Werks nach den höchsten Standards (Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG und EN81 / 40) konstruiert und getestet, um Ihnen Vertrauen in ein unabhängiges Leben zu geben.

LERNEN SIE DEN HORIZON-TREPPENLIFT KENNEN

Der Horizon Treppenlift bietet Ihnen die ideale Kombination aus Funktion und Komfort, sodass Sie das Leben in dem Haus genießen können, das Sie lieben.

Es gibt verschiedene Optionen, die für Sie und Ihren Komfort bei der Bestellung und Installation konfiguriert werden. Hier haben wir diese und viele andere Vorteile detailliert beschrieben, so dass Sie sicher sein können, dass der Horizon der richtige Treppenlift für Sie ist.

KOMFORT

Auswahl für einen einfachen und bequemen Treppenlift

- Die Ergo-Sitzpolsteroptionen mit dem Horizon sind so geformt, dass der Benutzer unabhängig von Größe und Form problemlos auf dem Sitz sitzen kann
- Eine hebelgebundene Fußplatte bedeutet kein umständliches Bücken, um die Fußplatte hochzuklappen
- Elektrischer oder manueller Hebel zum einfachen Verlassen des Sitzes
- Kann bis zu 140 kg aufnehmen.

Verstellbare
Armlehnen,
Rückenlehne
und Fußplatte



Ergonomischer
Joystick ist
eine einfach
zu bedienende
Funktion



SICHERHEIT

Damit Sie und Ihre Lieben sich wohl fühlen

- Einfach zu verwendender Sicherheitsgurt zu Ihrer Sicherheit
- Unsere Treppenlifte sind batteriebetrieben, so dass Sie im Falle eines Stromausfalls immer noch Zugang zu Ihrem Haus haben
- Automatische Stoppfunktion, wenn sich auf Ihrer Treppe ein Hindernis befindet
- Digitale Textanzeige für Echtzeitdiagnose, gut sichtbar auf der Armlehne



Digitale
Textanzeige



Fernbedienung -
Drücken Sie die Taste,
um Ihren Treppenlift
nach oben oder unten
zu rufen


Elektrische
Klappschiene



PLATZSPARENDE LÖSUNGEN

Kompaktes Design, das sich perfekt in Ihr Zuhause einfügt

- Klappen Sie Arme, Stuhl und Fußplatte weg, um sicherzustellen, dass Ihr Treppenlift Ihre Treppe für andere uneingeschränkt zugänglich macht
- Die Option einer ferngesteuerten elektrischen Klappschiene. Entfernen Sie die Unannehmlichkeiten einer hervorstehenden Schiene von der Unterseite Ihrer Treppe. Eine ideale Lösung, um Türen oder Gehwege nicht zu blockieren

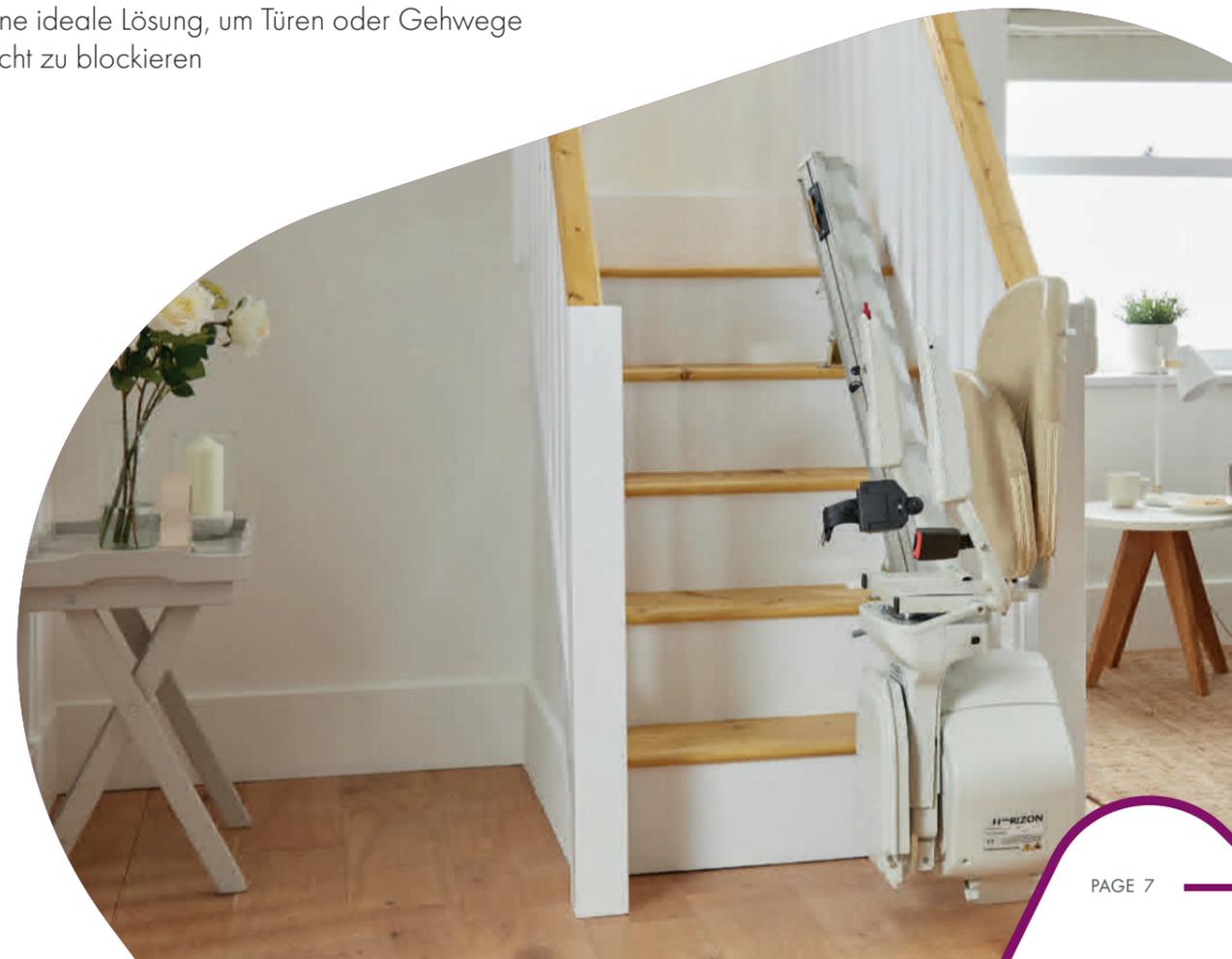



DIE OPTIONEN

Der Horizon verfügt über eine Reihe wichtiger Funktionen, die ihn zu einem barrierefreien Stuhl für jedermann machen und sich nahtlos in Ihr Zuhause einfügen.



SITZEINSTELLUNG

Einstellbare Armlehnen für optimalen Komfort

DER SITZ

Einstellbarer Sitz mit Ergo Standard Sitzpolster oder Ergo Plus Sitzpolster

SITZANPASSUNGEN

Der Drehsitz - Elektrisch oder manueller Sitzhebel



Standard Sitz



Ergo Plus Sitz



MAX GEWICHT



DIE SCHIENE

Die Option mit elektrische Klappschiene oder Standard-Aluminiumschiene Standardstart



Standardstart



Elektrische Klappschiene

DER STANDORT

Der Horizon Treppenlift eignet sich für gerade Treppen im Innen- und Außenbereich



DAS POLSTER

Eine Auswahl an Farben, die zu Ihrer Wohnkultur passen



Hellrot



Kobaltblau



Hellgrau



Mandelbeige


DIE HORIZON-REISE

Sechs einfache Schritte, mit denen Sie Ihr ganzes Zuhause genießen können.


- 1 Rufen Sie Ihren Treppenlift an und wenn Sie eine elektrische Klappschiene gewählt haben, verlängern Sie Ihre Schiene mit Ihrer Fernbedienung.



- 2 Senken Sie die Armlehnen und das Sitzpolster ab und legen Sie die Fußplatte mit dem leicht erreichbaren Seitenhebel ab. Ihr Platinum Horizon Treppenlift ist einsatzbereit. Auf dem digitalen Diagnosebildschirm wird "Platinum" angezeigt, was bedeutet, dass Sie bereit sind.

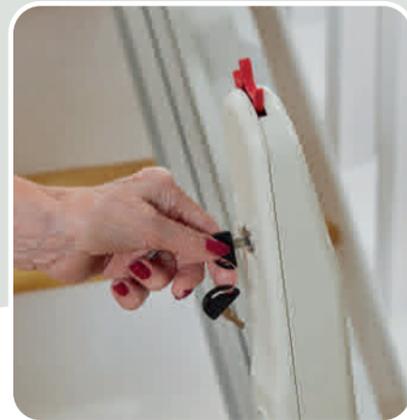

- 3 Ihr Platinum Horizon-Stuhl wird bei der Installation vollständig an Ihre Größe und Form angepasst. Sie müssen also nur den Sicherheitsgurt anlegen und können loslegen.

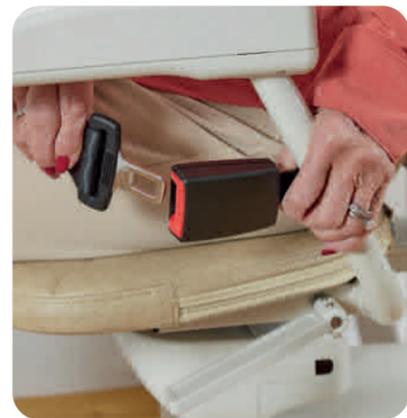


- 4 Um Ihren Platinum Horizon Treppenlift zu bedienen, verwenden Sie einfach den ergonomischen Joystick in der Armlehne und drücken Sie leicht in die Richtung, in die Sie fahren möchten.



- 5 Wenn Sie an Ihrem Ziel angekommen sind, warten Sie einfach, bis der elektrische Sitz dreht. Sobald Sie fertig sind, lösen Sie den Gurt und steigen Sie sicher aus. Wenn Sie einen Lift mit manuellem Dreh gewählt haben, drehen Sie den Sitz einfach mit dem Hebel an der Seite des Sitzes.





- 6 Wenn Sie fertig sind, können Sie die Arme und den Sitz hochklappen und mit dem Fußplattenhebel wegklappen und das Schlüsselschloss drehen.

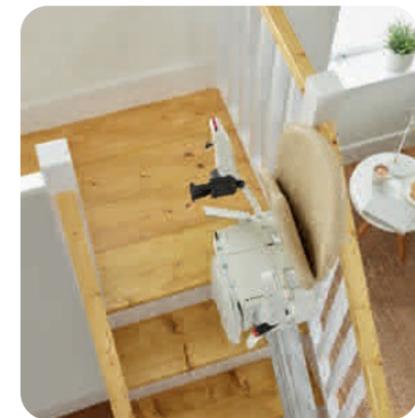

HORIZON-SPEZIFIKATION

GESCHWINDIGKEIT:	120mm/s (0.12m/s) Maximum
ANTRIEB:	Zahnstange & Zahnrad
GEWICHTSKAPAZITÄT:	140kg / 22St / 265 lbs
TREPPENSTEIGUNG:	Bis zu 65°
BEDIENUNG:	Joystick am Arm
ZERTIFIZIERUNG:	BS EN 81:40 Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG
SITZDREHUNG:	Standardmäßig manuell drehbar Elektrische 1-Wege-Drehoption
FUSSSTÜTZE:	Handhebel an der Fahreinheit
SITZHÖHE:	Einstellbar auf 465 mm / 485 mm / 505 mm Sitz zu Fußstütze
SITZVARIANTEN:	Einstellbarer Sitz mit Ergo Standard Rückenlehne und Sitzpolster oder Ergo Space Rückenlehne und Ergo Plus Sitzpolster
SICHERHEITSKANTEN:	Sicherheitskanten um die Antriebseinheit zum Schutz vor Einklemmgefahren

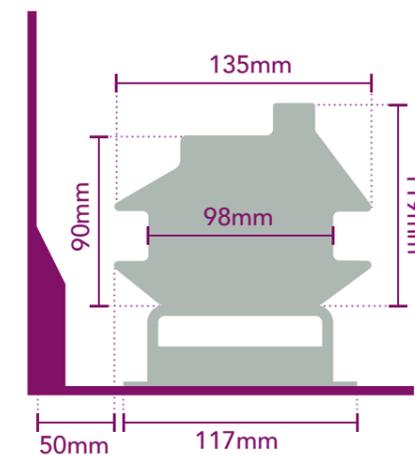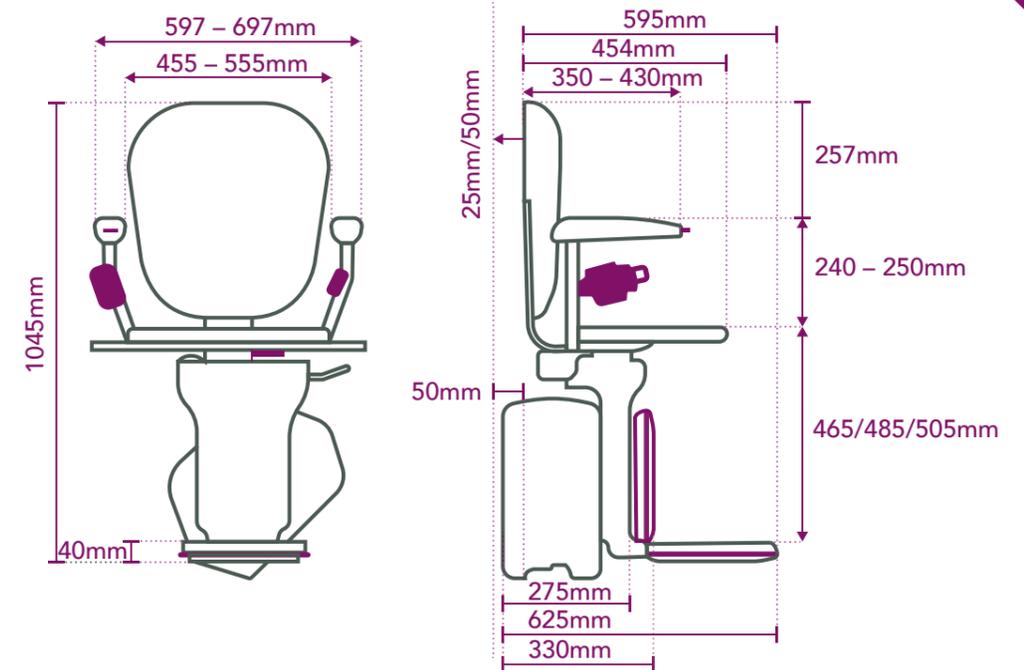

WARUM PLATINUM WÄHLEN?

Platinum Stairlifts ist ein britischer Hersteller mit Sitz in Yorkshire. Seit 1996 bieten wir hochwertige Treppenlifte an.

Verpflichtung zu höchster Qualität, Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit. Jeder Treppenlift wird in unserer Fabrik vor der Auslieferung nach höchsten Standards getestet und mit einem personalisierten, signierten Qualitätszertifikat geliefert.

Platinum Stairlifts arbeitet weltweit eng mit einem anerkannten Partnernetzwerk zusammen. Sie können sicher sein, dass Ihr Treppenliftanbieter von unserem Qualitätsprodukt überzeugt ist und von uns umfassend geschult und unterstützt wird, um die beste Lösung für Sie bereitzustellen.

„Wenn unsere Kunden einen Treppenlift benötigen, ist Zeit entscheidend. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für die Arbeit mit Platinum-Treppenliften - sie bieten ein Qualitätsprodukt für Treppen aller Formen und Größen und mit einer hervorragenden Bearbeitungszeit. Wenn es jemals Probleme gibt, sind sie immer zur Stelle, um uns zu unterstützen und die Dinge schnell zu lösen.“

Platinum-Partner - März 2021





04509 Delitzsch
Vierzehner Reihe 1a
Tel. 034 202 - 97 97 50
Fax 034 202 - 97 97 51
info@enwimo.de
www.enwimo.de

Platinum Stairlifts Ltd, Unit 10 Crosshills Business Park,
Keighley, West Yorkshire, BD20 7BW
+44 (0) 1535 631 177
www.platinumstairlifts.com
enquiries@platinumstairlifts.com
Firmenregistrierungsnummer: 3179671
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 288337264

Quality | Reliability | Partnership | Innovation | Caring



Zertifiziert nach BSEN81-40: 2008 und Euro Pat App 3478618
Informationen zum Patent finden Sie unter www.platinumstairlifts.com/patent